

Wichtige Hinweise für die Praxis

cogvisAI alarmiert über die Rufanlage:


Die 3D Smart-Sensoren von cogvisAI sind mit der Rufanlage gekoppelt. Sobald das System eine kritische Situation (Sturzgefährdung, Sturz, überlange Abwesenheit etc.) erkennt, werden Sie über die Rufanlage alarmiert. Den Grund für die Alarmierung können Sie im Bedarfsfall über die cogvisAI Plattform einsehen.

Sie können das cogvisAI System jederzeit deaktivieren:


NEU!

In bestimmten Pflegesituationen kann es zur Alarmierung durch das cogvisAI System kommen. Um dies zu vermeiden, können Sie das cogvisAI System beim Betreten des Zimmers mit Hilfe des im Türbereich angebrachten Tasters jederzeit deaktivieren. So funktioniert's...


1 Taster aufsuchen 2 System deaktivieren 3 Überprüfen

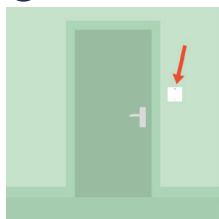

Der Taster ist im Regelfall im Zimmer des Bewohners neben der Tür angebracht.

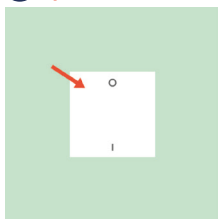

Durch Drücken der Taste  können Sie das System für eine bestimmte Zeit deaktivieren.

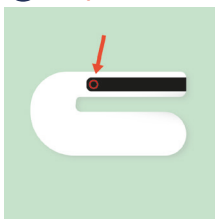

Das System ist tatsächlich deaktiviert, wenn das rote Sensorlicht nicht mehr leuchtet.

Anmerkungen:

- Das cogvisAI System wird nur für die von Ihnen festgelegte Dauer deaktiviert.
- Die Deaktivierungsdauer kann entweder durch erneutes Drücken der -Taste oder in der cogvisAI Verwaltungsoberfläche verlängert werden.
- Über die -Taste kann das System vor Ablauf der Deaktivierungsdauer wieder aktiviert werden.

Büro

+43 1 236 058 0
office@cogvis.at
www.cogvis.ai

Support

+43 1 236 058 014
support@cogvis.at

Ihr Vertriebskontakt:

Ihre Notizen:

cogvisAI

Die smarte Pflegelösung

Ihre cogvisAI Vorteile

- Mittels cogvisAI Sturzprävention können Sie Stürze aktiv verhindern.
- Die cogvisAI Sturzgenesefunktion ermöglicht Ihnen die Rekonstruktion besonders kritischer Sturzhergänge.
- Dank cogvisAI können Sie die Sicherheit Ihrer BewohnerInnen signifikant steigern.
- ▶ Ihnen bleibt mehr Zeit für das Wesentliche!

Was ist cogvisAI?

cogvisAI kann mittels intelligenter 3D Smart-Sensoren Bewegungen im Raum erkennen und analysieren und bei kritischen Situationen oder Ereignissen einen Alarm auslösen.

cogvisAI kombiniert zahlreiche Funktionen von konventionellen Pflegeunterstützungssystemen wie Sturzmatten, Bettfluchtbalken und Desorientiertensystemen, wodurch sich Ihr Arbeitsaufwand im Pflegealltag deutlich verringert.


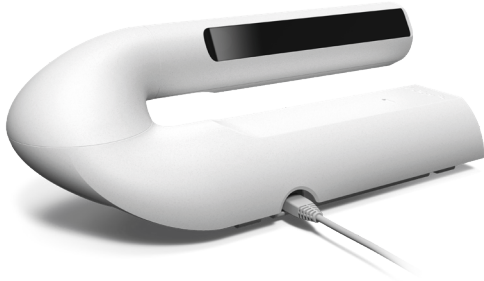


Bild 1: cogvisAI 3D Smart-Sensor

Da cogvisAI ausschließlich anonyme 3D Daten verwendet, ist der Schutz Ihrer Privatsphäre und der Ihrer BewohnerInnen jederzeit sichergestellt.

cogvisAI Tiefenbilder

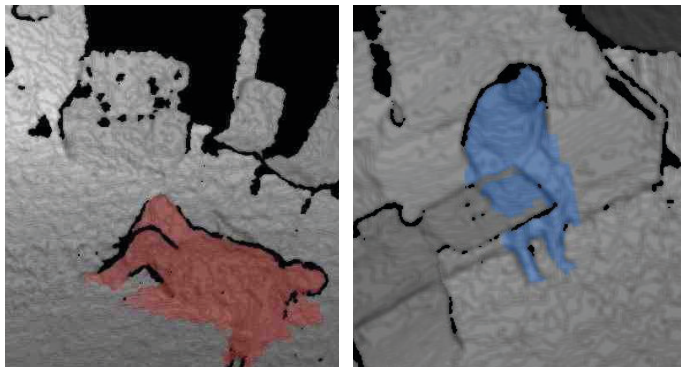


Bilder 2 & 3: Tiefenbilder „Sturz“ und „Aufsetzen“

Diese Module beinhaltet cogvisAI aktuell:


Sturzprävention

Verhindert effektiv Stürze durch rechtzeitige Alarmierung beim Aufrichten, Aufsetzen oder Aufstehen sturzgefährdeter Personen.

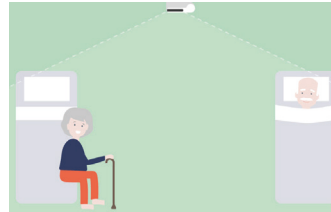


Sturzerkennung

Bei Stürzen und ähnlichen Situationen erfolgt eine sofortige Alarmierung über die Rufanlage. Dies ermöglicht rasche Hilfeleistung.

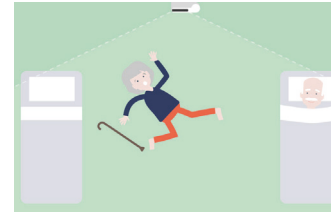


Sturzgenese

Manchmal ist es wichtig zu wissen, wie ein Sturz genau passiert ist. In diesem Fall kann das Modul „Sturzgenese“ helfen.

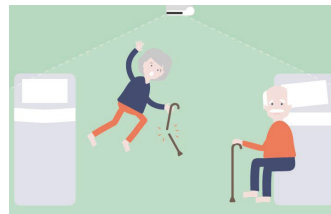


Virtueller Bettbalken

Der virtuelle Bettbalken ersetzt physische Eingrenzungsvorrichtungen und erhöht somit die gefühlte Freiheit der BewohnerInnen bzw. PatientInnen.

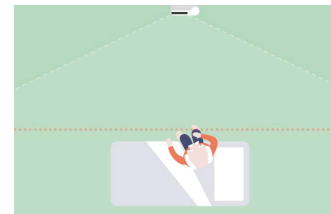


Suizidprävention

Schützt durch rechtzeitige Erkennung kritischer Situationen – bspw. gefährdete Personen, die sich länger als 20 Sekunden vor dem Fenster aufhalten.

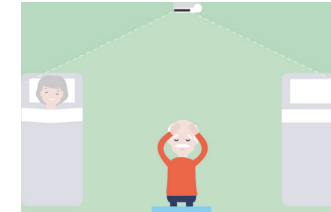

Lichtsteuerung

Schaltet das Licht – im Unterschied zu herkömmlichen Bewegungsmeldern – erst dann ein, wenn die Person tatsächlich aufstehen will.

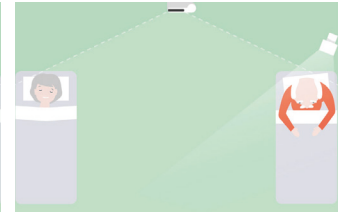

Kontaktieren Sie Ihre cogvis Ansprechperson oder den cogvis Support (Kontakt auf der Rückseite), um zu erfahren, wie cogvisAI Sie in Ihrer Einrichtung optimal unterstützen kann.

Die cogvisAI Vorteile im Überblick:



Die Präventionsfunktionen helfen dabei, Stürze zu vermeiden, bevor sie eintreten.



Die zeitige Erkennung von Stürzen ermöglicht schnelle Reaktionszeiten.



Schwere Stürze können rekonstruiert und analysiert werden.



Das cogvisAI System kann mittels Dockingstation mobil eingesetzt werden.



Alle Daten werden streng vertraulich und DSGVO-konform verarbeitet.



cogvisAI bietet ein Maximum an Sicherheit für Ihre Einrichtung!

NEU!